


Istruzioni per il montaggio/smontaggio dell'introduttore GANNET®

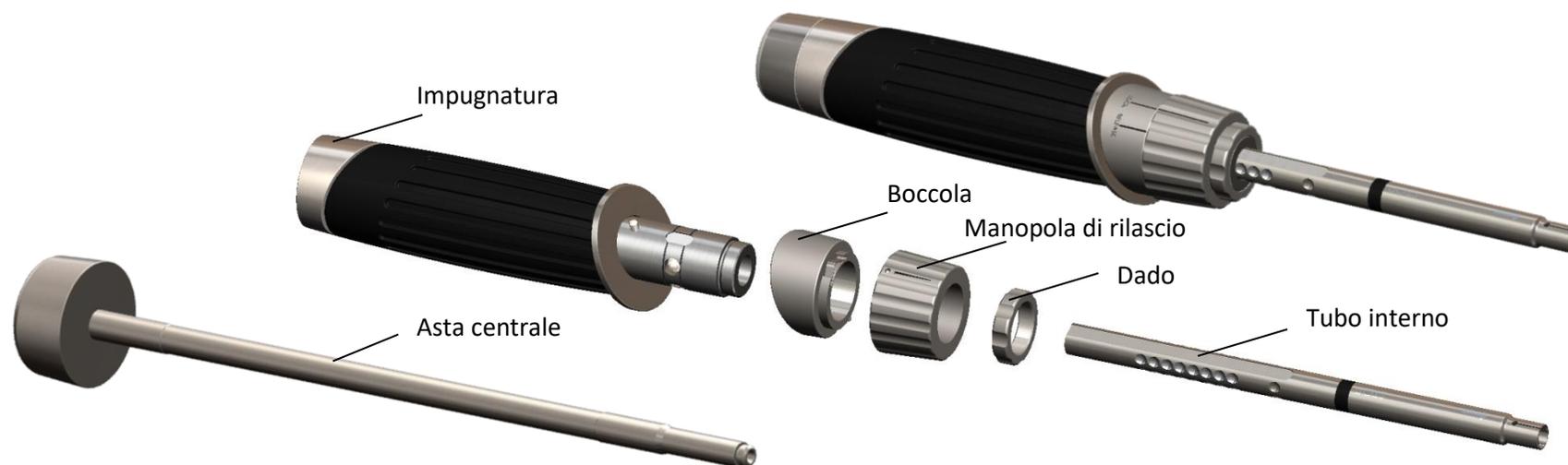

Montaggio

- 1 Posizionare la boccola sull'impugnatura.
- 2 Posizionare la manopola di rilascio con l'indicatore allineato con l'indicatore di rilascio sulla boccola.
- 3 Serrare il dado filettato.
- 4 Posizionare il tubo interno. Allineare il contrassegno sul tubo interno con l'indicatore di blocco sulla boccola.
- 5 Posizionare l'asta centrale nel vassoio separatamente

Smontaggio

- 1 Estrarre l'asta centrale dall'introduttore.
- 2 Rimuovere il tubo interno, assicurarsi che l'indicatore sulla manopola di rilascio sia allineato con il rilascio.
- 3 Allentare il dado filettato.
- 4 Rimuovere la manopola di rilascio.
- 5 Rimuovere la boccola.



Manufacturer: BAAT Medical Products B.V. • F.Hazemeijerstraat 800 • 7555 RJ Hengelo • The Netherlands • +31 88 56 56 600 • www.baatmedical.com

Distributor: GANNET B.V. • F.Hazemeijerstraat 800 • 7555 RJ Hengelo • The Netherlands • +31 85 401 26 45 • www.gannetimplant.com

CE 0344