


(De)montagehandleiding voor de GANNET® Introducer

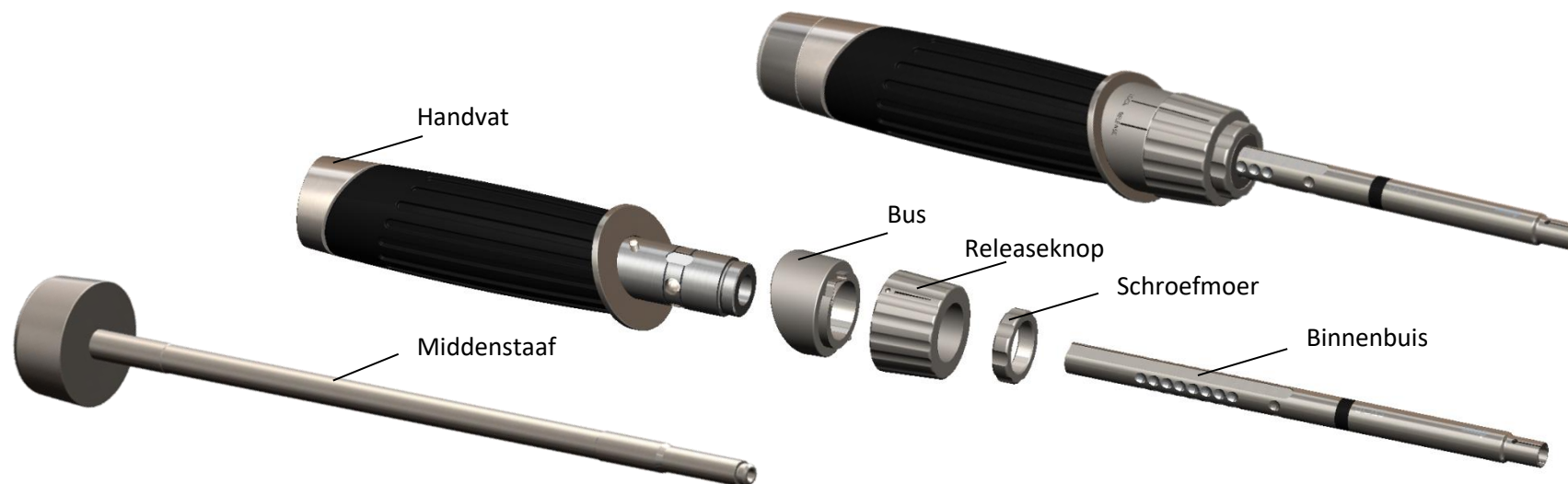

Montage

- 1 Plaats de Bus op het handvat.
- 2 Plaats de Releaseknop waarbij de indicator op één lijn komt te liggen met de release-indicator op de Bus.
- 3 Draai de moer aan.
- 4 Plaats de Binnenbuis. Breng de groef van de Binnenbuis op één lijn met de vergrendelingsindicator op de Bus.
- 5 Plaats de Middenstaaf apart in de tray.

Demontage

- 1 Neem de Middenstaaf uit de Introducer.
- 2 Verwijder de Binnenbuis, en zorg ervoor dat de indicator op de Releaseknop op één lijn ligt met Release.
- 3 Draai de schroefmoer los.
- 4 Verwijder de Releaseknop.
- 5 Verwijder de Bus.



Manufacturer: BAAT Medical Products B.V. • F.Hazemeijerstraat 800 • 7555 RJ Hengelo • The Netherlands • +31 88 56 56 600 • www.baatmedical.com

Distributor: GANNET B.V. • F.Hazemeijerstraat 800 • 7555 RJ Hengelo • The Netherlands • +31 85 401 26 45 • www.gannetimplant.com

02019BR081218_GANNET®_Disassembly_Instructions_Introducer_NL_rev5 (1 April 2020)

CE 0344